

ASLO - antistreptolysin O

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.6.2023	
ASLO - ANTISTREPTOLYSIN O			ASLO
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	5,2 %
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	IU/ml
Referenční meze	sérum	0 – 15 let	0-150 IU/ml
		15 – 110 let	0-200 IU/ml
SOP	SOPV 139		
Kód VZP	NČLP	Poznámka	
82091	11478		
Poznámka	je třeba vyloučit hemolýzu a chylózní séra		
PREANALYTIKA:			
Příprava pacienta			
Vliv materiálu			
Stabilita při 20°C		2 dny	
Stabilita při 4-8°C		1 týden	
Stabilita při -20°C		6 měsíců	

Vliv léků	snižují adrenokortikosteroidy
Vliv denních a jiných cyklů	sezonní variace (vyšší hodnoty v zimě a na jaře)
Další faktory	
Biologický poločas	