

Beta-2-mikroglobulin

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY															
		Laboratorní příručka OKB													
Seznam základních a speciálních vyšetření															
		platí od: 1.3.2024													
BETA-2-MIKROGLOBULIN			B2MG												
Biologický materiál	sérum, moč sbíraná (pH 7)	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den												
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr moč - plastová zkumavka	Nejistota	2,6 %												
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	mg/l												
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td colspan="2">1-2,4 mg/l</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>moč</td><td>koncentrace</td><td></td></tr><tr><td></td><td>0-0,4 mg/l</td><td></td></tr></table>			sérum	1-2,4 mg/l					moč	koncentrace			0-0,4 mg/l	
	sérum	1-2,4 mg/l													
	moč	koncentrace													
	0-0,4 mg/l														
SOP	SOPV 278														
Kód VZP	NČLP	Poznámka													
91193	19486, 19487														
Poznámka	ihned zpracovat, při pH < 6 je denaturován za 2 hod. (již v močovém měchýři)														
PREANALYTIKA:															
Příprava pacienta		není nutná													
Vliv materiálu															

Stabilita při 20°C	sérum: 1 den; moč (pH 7): 1 den
Stabilita při 4-8°C	sérum: 3 dny; moč (pH 7): 1 den
Stabilita při -20°C	sérum: 3 měsíce; moč (pH 7): 3 měsíce
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	není znám
Další faktory	zvýšení hodnot: tělesné cvičení, horečnaté stavy
Biologický poločas	42 minut