

Draslík

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.3.2024	
DRASLÍK			K
Biologický materiál	sérum, moč	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr moč - plastová zkumavka	Nejistota	1,0 %
Použitá metoda	ISE s ředěním	Jednotka	mmol/l, mmol/24 hod.
Referenční meze	sérum	0 – 7 dní	3,2-5,5 mmol/l
		7 dní – 1 měsíc	3,4-6,0 mmol/l
		1 – 6 měsíců	3,5-5,6 mmol/l
		6 měsíců – 1 rok	3,5-6,1 mmol/l
		1 - 15 let	3,6-5,9 mmol/l
		15 - 60 let	3,8-5,0 mmol/l
		60 - 90 let	3,9-5,3 mmol/l
		90 - 110 let	3,6-5,5 mmol/l
	moč	0 – 1 měsíc	0-25 mmol/l; 0-25 mmol/24 hod
		1 měsíc – 1 rok	15-40 mmol/l; 15-40 mmol/24 hod
		1 – 15 let	20-40 mmol/l; 20-40 mmol/24 hod
		15 – 110 let	35-80 mmol/l; 35-80 mmol/24 hod

SOP	SOPV 20, SOPV 365	
Kód VZP	NČLP	Poznámka
81393, 81145	05254, 02265, 02274	
Poznámka	odběr nejlépe bez zatažení paže oddělit sérum od krevního koláče do 4 hodin	
PREANALYTIKA:		
Příprava pacienta	odběr ráno nalačno, nepoužívat velmi tenkou jehlu, krev nenasávat, moč sbírat za 24 h (12 h) do plastové nádoby bez konzervačních přísad	
Vliv materiálu	interferuje: hemolýza	
Stabilita při 20°C	sérum: 8 hodin; moč: -	
Stabilita při 4-8°C	sérum: 2 týdny; moč: 1 den	
Stabilita při -20°C	sérum: 1 rok; moč: -	
Vliv léků		
Vliv denních a jiných cyklů	moč: diurnální variace s max. kolem poledne a odpoledne	
Další faktory	<u>hodnoty zvyšuje:</u> delší zatažení paže, zvýšení Hb v séru, hemolýza <u>hodnoty snižuje:</u> káva, alkoholismus, tělesná námaha	
Biologický poločas		