

Ethanol

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 28.6.2024			
ETHANOL			ETH		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	6,3 %		
Použitá metoda	enzymatické stanovení	Jednotka	g/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0,0-0,1 g/l</td></tr></table>			sérum	0,0-0,1 g/l
sérum	0,0-0,1 g/l				
SOP	SOPV 103				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81723	53501				
Poznámka	Ethanol je prchavá tekutina - bezprostředně po odběru vzorku je nezbytně nutné odběrovou zkumavku pevně uzavřít. Separace séra do 3 hod. Přepočet: alkohol v krvi [‰] x 1,23 = ethanol v séru [g/l] ethanol v séru [g/l] x 0,8 = alkohol v krvi [‰]				

PREANALYTIKA:	
Příprava pacienta	dezinfekce odběrového místa prostředkem bez alkoholu - nechat úplně zaschnout
Vliv materiálu	TAG nad 11,3 mmol/l; bilirubin nad 85 µmol/l
Stabilita při 20°C	2 týdny
Stabilita při 4-8°C	2 týdny
Stabilita při -20°C	-
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	hodnoty zvyšuje: kontaminace odběrového místa dezinfekčními prostředky s alkoholem, jodová tinktura, jodisol, peroxid vodíku
Biologický poločas	