

Folitropin (Folikulostimulační hormon)

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY																		
		Laboratorní příručka OKB																
Seznam základních a speciálních vyšetření																		
			platí od: 1.3.2024															
FOLITROPIN (FOLIKULOSTIMULAČNÍ HORMON)			FSH															
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den															
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	5,6 %															
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	U/l															
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0 – 13 let</td><td>1,2-7,8 U/l</td></tr><tr><td></td><td>13 – 50 let muži</td><td>1,4-18,1 U/l</td></tr><tr><td></td><td>50 – 110 let muži</td><td>2,8-55,5 U/l</td></tr><tr><td></td><td>13 – 55 let ženy</td><td>1,5-33,4 U/l</td></tr><tr><td></td><td>55 – 110 let ženy</td><td>23-116 U/l</td></tr></table>			sérum	0 – 13 let	1,2-7,8 U/l		13 – 50 let muži	1,4-18,1 U/l		50 – 110 let muži	2,8-55,5 U/l		13 – 55 let ženy	1,5-33,4 U/l		55 – 110 let ženy	23-116 U/l
	sérum	0 – 13 let	1,2-7,8 U/l															
		13 – 50 let muži	1,4-18,1 U/l															
		50 – 110 let muži	2,8-55,5 U/l															
		13 – 55 let ženy	1,5-33,4 U/l															
	55 – 110 let ženy	23-116 U/l																
SOP	SOPV 255																	
Kód VZP	NČLP	Poznámka																
93129	19594																	
Poznámka																		
PREANALYTIKA:																		
Příprava pacienta																		
Vliv materiálu	nemá vliv: TAG do 11,3 mmol/l, bilirubin do 340,0 µmol/l																	

Stabilita při 20°C	1 týden
Stabilita při 4-8°C	1 týden
Stabilita při -20°C	5 let
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	hladina FSH se mění v průběhu menstruačního cyklu snížené hodnoty během těhotenství Hodnoty FSH u těhotných žen: <0,3 U/l
Další faktory	hodnoty snižuje: akutní stavy, tělesné cvičení, hladovění, obezita hodnoty zvyšuje: alkoholismus, kouření
Biologický poločas	3-4 hodiny