

Imunoglobulin IgA

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.6.2023	
IMUNOGLOBULIN IGA			IGA
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	5,4 %
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l
Referenční meze	sérum	muži	ženy
	0 – 1 měsíc	0,01-0,07 g/l	0,01-0,07 g/l
	1 – 3 měsíce	0,08-0,5 g/l	0,09-0,4 g/l
	4 – 6 měsíců	0,1-0,8 g/l	0,1-0,8 g/l
	7 – 12 měsíců	0,25-1,4 g/l	0,24-1,4 g/l
	1 – 2 roky	0,32-1,4 g/l	0,29-1,4 g/l
	2 – 3 roky	0,42-1,8 g/l	0,42-1,8 g/l
	6 – 11 let	0,6-2,2 g/l	0,6-2,2 g/l
	11 – 16 let	0,9-2,8 g/l	0,9-2,8 g/l
	16 – 50 let	0,9-4,1 g/l	0,7-3,7 g/l
	50 – 90 let	0,7-4,3 g/l	0,7-4,1 g/l
	90 - 110 let	0,94-9,5 g/l	0,98-8,18 g/l
SOP	SOPV 26		
Kód VZP	NČLP	Poznámka	

91131	02144	
Poznámka	Upřednostňuje se stanovení ze séra nalačno. Sérum oddělit od buněk do 2 hodin.	
PREANALYTIKA:		
Příprava pacienta	Hodnoty zvyšuje tělesné cvičení před odběrem, jsou prokázány rozdíly v odběru vleže a vsedě.	
Vliv materiálu	bilirubin nad 300 µmol/l; Hb nad 5 g/l; TAG nad 10 mmol/l	
Stabilita při 20°C	1 den	
Stabilita při 4-8°C	1 týden	
Stabilita při -20°C	3 měsíce	
Vliv léků		
Vliv denních a jiných cyklů		
Další faktory		
Biologický poločas	6 dní	