

Imunoglobulin IgM

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.6.2023	
IMUNOGLOBULIN IGM			IGM
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	5,5 %
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l
Referenční meze	sérum	muži	ženy
	1 – 15 dní	0,01-0,2 g/l	0-0,22 g/l
	16 dní – 3 měsíce	0,22-0,5 g/l	0,27-0,57 g/l
	3 – 12 měsíců	0,32-0,95 g/l	0,45-1,09 g/l
	1 – 2 roky	0,44-1,0 g/l	0,5-1,15 g/l
	2 – 3 roky	0,52-0,99 g/l	0,6-1,13 g/l
	3 – 6 let	0,48-0,92 g/l	0,55-1,05 g/l
	6 – 8 let	0,5-1,11 g/l	0,57-1,27 g/l
	8 – 11 let	0,57-1,38 g/l	0,66-1,58 g/l
	11 – 16 let	0,5-1,1 g/l	0,56-1,12 g/l
	16 – 60 let	0,4-1,82 g/l	0,6-2,2 g/l
	60 – 90 let	0,28-1,98 g/l	0,5-2,7 g/l
	90 – 110 let	0,4-1,82 g/l	0,42-2,9 g/l
SOP	SOPV 28		

Kód VZP	NČLP	Poznámka
91133	02226	
Poznámka		
PREANALYTIKA:		
Příprava pacienta	preferuje se odběr nalačno	
Vliv materiálu	interference: bilirubin nad 30 µmol/l Hb nad 5 g/l TAG nad 10 mmol/l	
Stabilita při 20°C	1 den	
Stabilita při 4-8°C	1 týden	
Stabilita při -20°C	3 měsíce	
Vliv léků		
Vliv denních a jiných cyklů	hodnoty snižuje menopauza, těhotenství	
Další faktory	hodnoty snižuje kouření	
Biologický poločas	5 dní	