

Lipoprotein (a)

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 27.5.2024			
LIPOPROTEIN (A)			LP(A)		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	5,2 %		
Použitá metoda	turbidimetrie	Jednotka	nmol/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-75 nmol/l</td></tr></table>			sérum	0-75 nmol/l
sérum	0-75 nmol/l				
SOP	SOPV 34				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81541	18004				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta	odběr ráno po 12 h lačnění				
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	2 dny				
Stabilita při 4-8°C	2 týdny				
Stabilita při -20°C	3 měsíce				
Vliv léků	hodnoty snižuje: kyselina nikotinová, aspirin;				

	hodnoty zvyšuje: statiny
Vliv denních a jiných cyklů	menopauza hodnoty zvyšuje
Další faktory	hodnoty snižuje: alkohol, kouření
Biologický poločas	3-4 dny