

Okultní krvácení - hemoglobin ve stolici

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
OKULTNÍ KRVÁCENÍ - HEMOGLOBIN VE STOLICI			FOB		
Biologický materiál	stolice - vzorek	Dostupnost	statim: není rutina: 1 týdně		
Typ zkumavky např.	speciální odběrové zkumavky (FOB Gold Tube) se dvěma víčky bezbarvým a barevným (dodá OKB)	Nejistota	11,6 %		
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	ng/ml		
Referenční meze	<table><tr><td>stolice</td><td>0-50 ng/ml</td></tr></table>			stolice	0-50 ng/ml
stolice	0-50 ng/ml				
SOP	SOPV 115				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81733	16343	<i>přepočítávací faktor</i> ng/ml*0,17=µg/g stolice			
Poznámka	<u>Postup odběru:</u> Odšroubujte barevné víčko s odběrovou tyčinkou a vytáhněte ven. Odeberte vzorky stolice zanořením tyčinky do tří různých míst stolice. Víčko s tyčinkou opět vložte zpět do zkumavky a řádně zašroubujte. Zkumavku promíchejte, čitelně označte příjmením, jménem a rodným číslem pacienta. Dopravte ji co nejdříve do laboratoře OKB. <u>Hodnoty hemoglobinu ve stolici:</u> v rozmezí 51-99 ng/ml odpovídají rozmezí pro tzv „šedou zónu“ (cut-off je 100 ng/ml). V tomto případě se doporučuje vyšetření opakovat s odstupem času.				

PREANALYTIKA:	
Příprava pacienta	Nevyžaduje žádná dietní opatření.
Vliv materiálu	Metoda je přesná, specifická pro lidský hemoglobin (neinterferuje zvířecí hemoglobin).
Stabilita při 20°C	1 týden
Stabilita při 4-8°C	2 týdny
Stabilita při -20°C	-
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	
Biologický poločas	