

Sedimentace erytrocytů FW

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY												
		Laboratorní příručka OKB										
Seznam základních a speciálních vyšetření												
		platí od: 1.3.2024										
SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ FW			FW									
Biologický materiál	plná krev	Dostupnost	statim: 2 hod. po odběru rutina: 2 hod. po odběru									
Typ zkumavky např.	BD Vacutainer - černý uzávěr - 1,8 ml 4 obj. díly venózní krve do 1 obj. dílu citrátu sodného (3,8%)	Nejistota										
Použitá metoda	sedimentace erytrocytů v čase	Jednotka	mm									
Referenční meze	<table><tr><td>plná krev</td><td>za 1 hod</td><td>za 2 hod</td></tr><tr><td>muži</td><td>2-10 mm</td><td>4-27 mm</td></tr><tr><td>ženy</td><td>3-21 mm</td><td>7-48 mm</td></tr></table>			plná krev	za 1 hod	za 2 hod	muži	2-10 mm	4-27 mm	ženy	3-21 mm	7-48 mm
plná krev	za 1 hod	za 2 hod										
muži	2-10 mm	4-27 mm										
ženy	3-21 mm	7-48 mm										
SOP	SOPV 178											
Kód VZP	NČLP	Poznámka										
09133	01680, 01682											
Poznámka	Nutno dodržet poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem - sedimentační zkumavka musí být naplněna krví po rysku!											
PREANALYTIKA:												
Příprava pacienta												
Vliv materiálu												
Stabilita při 20°C	4 hodiny											

Stabilita při 4-8°C	1 den
Stabilita při -20°C	nemrazit
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	<u>hodnoty snižuje:</u> delší zatažení paže, vysoká hodnota hematokritu, odběr do NaF nebo oxalátu, odběr do menšího množství citrátu <u>hodnoty zvyšuje:</u> nízká hodnota hematokritu, odběr do většího množství citrátu, těhotenství, alkoholismus, obezita, vyšší věk
Biologický poločas	