

Thyroxin celkový

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
THYROXIN CELKOVÝ			T4		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	5,4 %		
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	nmol/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>63,2-141,9 nmol/l</td></tr></table>			sérum	63,2-141,9 nmol/l
sérum	63,2-141,9 nmol/l				
SOP	SOPV 252				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
93187	19739				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta	odběr vleže snižuje hladinu o 11 %, delší zatažení paže při odběru zvyšuje hodnoty až o 10 %				
Vliv materiálu					

Stabilita při 20°C	2 dny
Stabilita při 4-8°C	10 dní
Stabilita při -20°C	6 měsíců
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	těhotenství
Další faktory	<u>hodnoty snižuje:</u> hladovění, malnutrice, tělesné cvičení, stres, termální trauma, kouření <u>hodnoty zvyšuje:</u> hospitalizace (bez snížení TSH), hypertermie, obezita, těhotenství
Biologický poločas	